

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご相談ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSZ-008	製品名	イヤークリーナー
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していること起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
 - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライオン株式会社**

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL **06-6789-1199**

【月～金（祝日除く）10時～16時】

取扱説明書

EAR CLEANER

イヤークリーナー



最新情報は弊社公式サイトより
ご確認ください。

[https://www.lithon.co.jp/
product/healthcare/
ksz008/](https://www.lithon.co.jp/product/healthcare/ksz008/)



家庭用

(業務用として使用しないでください)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

製品仕様

電源 単4電池1本使用(別売)

サイズ 約 φ26 × 130 mm (ノズル装着時)

重量 約 30 g (ノズル・電池含む)

材質 ABS、PP

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。


注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定する内容を示しています。

- 吸引は耳以外には使用しないでください。
- モーター音や振動があるため、人によっては音が不快に感じられる事がありますので自己管理の元で使用していただき、長時間の使用はお避けください。
- 水を吸ったり、本体を水に浸けないでください。
- 基本的には乾いている耳アカの方用に作られています。湿り気のある耳アカの方が使用される場合は、こまめにノズルを掃除してください。
- 耳の医院におかかりの方は事前に医師にご相談ください。
- お子様だけの使用はお避けください。また乳幼児への使用はしないでください。
- 絶対に本体の分解や改造をしないでください。 ※感電、ショート、発火の原因になります。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。
※製品の故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所で放置しないでください。 ※発火、製品の故障の原因になります。
- 本体の水洗いはしないでください。
- 本体をシンナーやベンジン、アルコールでふかないでください。
※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
※感電、ケガを負う可能性があります。
- 高温・多湿の場所で保管しないでください。
- 長期間使用しない場合は電池を取り外してください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称

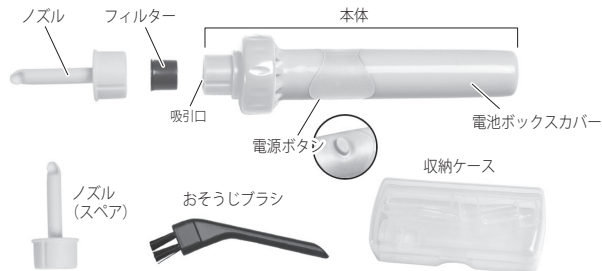

- 『フィルター』は『収納ケース』の内側に収納されています。
- 『フィルター』を本体に取り付ける際は、あまり強く差し込まないでください。取り外しにくくなるおそれがあります。
万一、強く差し込んでしまった場合はペンチ等で取り外してください。

ご使用方法

- ① 本体の電池ボックスカバーを外して、単4電池1本を+の向き(電池ボックスカバーに記載)に注意して挿入し、電池ボックスカバーを元通りに取りつけます。



- ② 吸引口にノズルをつけてください。(この際、吸引口とノズルの溝を合わせてつけます)
 - ③ 電源スイッチを押し、モーター作動音が確認できたら、耳の穴までノズルを持っていき、軽く円を描くように耳穴の壁にまわしながら耳アカを吸引していきます。
 - ④ 作動中に電源スイッチを押すと止まります。
- ※耳の形状など、個人差があります。先端部を奥まで差し込まないようにご注意ください。

お手入れ方法

- ノズルの清掃
 - ・使い終わったら電源スイッチをOFFにして、ノズルを外してください。
 - ・外したノズルを丸洗いし、乾燥させてください。
- フィルターの清掃
 - ・フィルターおよびその周辺についた耳アカをお手入れブラシで取り払います。
 - ・フィルターは取り外して丸洗いもできます。